



Цифровой гибкий уретероскоп одноразовового применения **LithoVue™**

Компоненты устройства одноразового применения

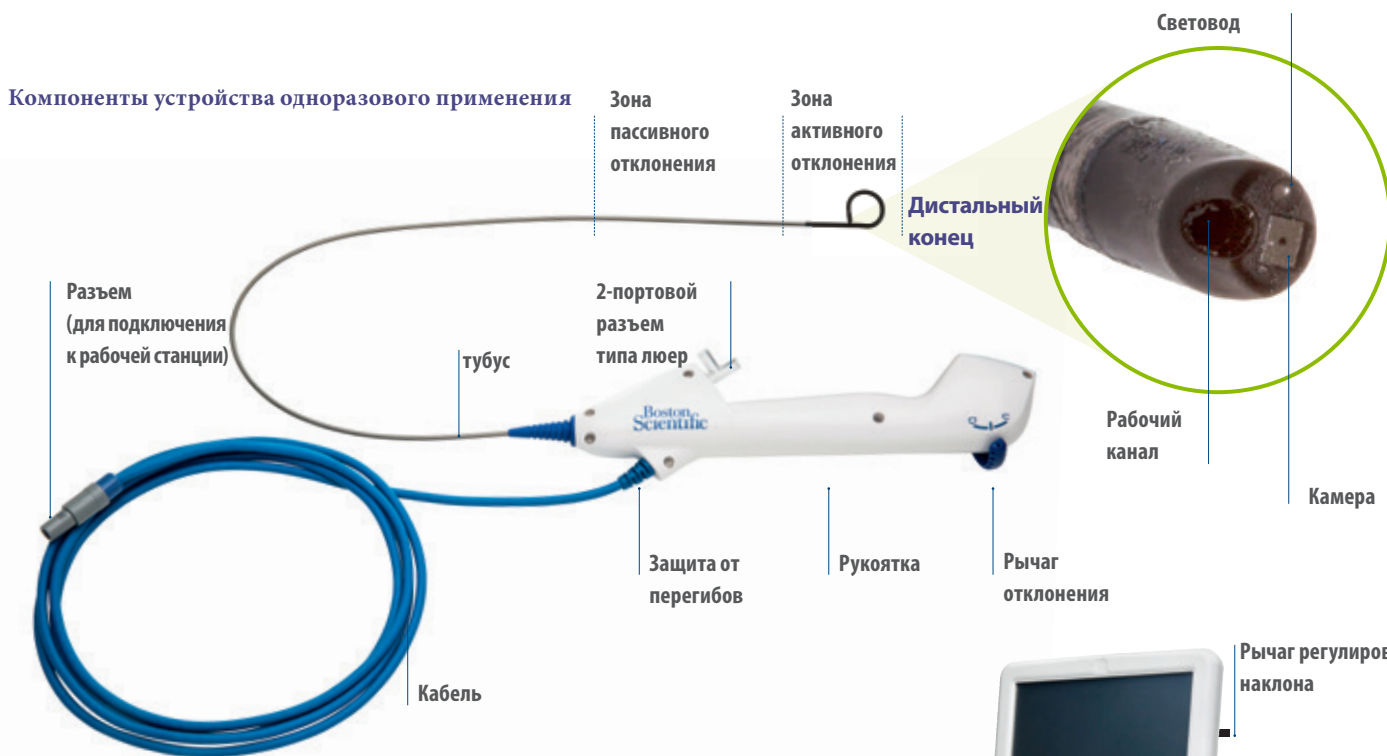

Компоненты рабочей станции и тележки

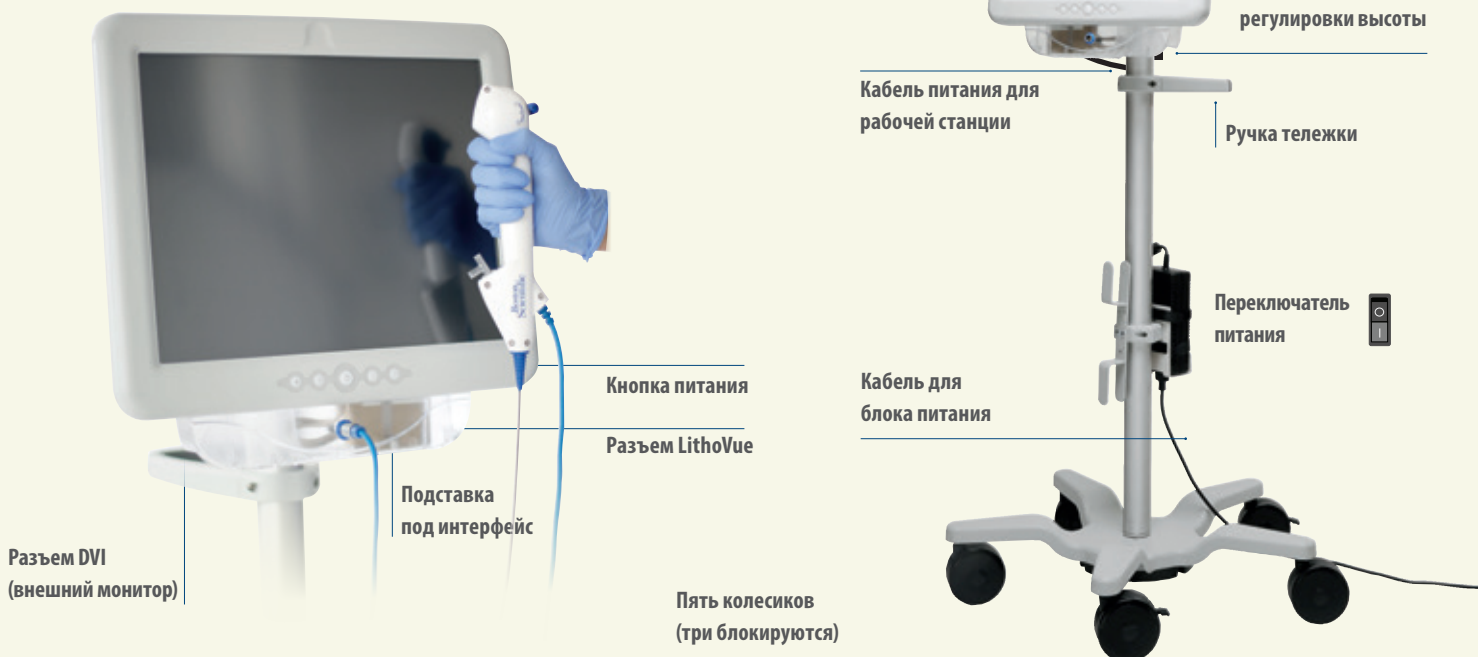

Цифровой гибкий уретероскоп одноразового применения **LithoVue™**

Компоненты системы

Экран интерфейса

Версия программного обеспечения

Подсветка

Увеличение освещенности

Уменьшение освещенности


Уровень яркости

Индикатор процесса калибровки

Индикатор остаточного времени работы

Переключатель положения значков (вправо/влево):

Мочевыделительная система

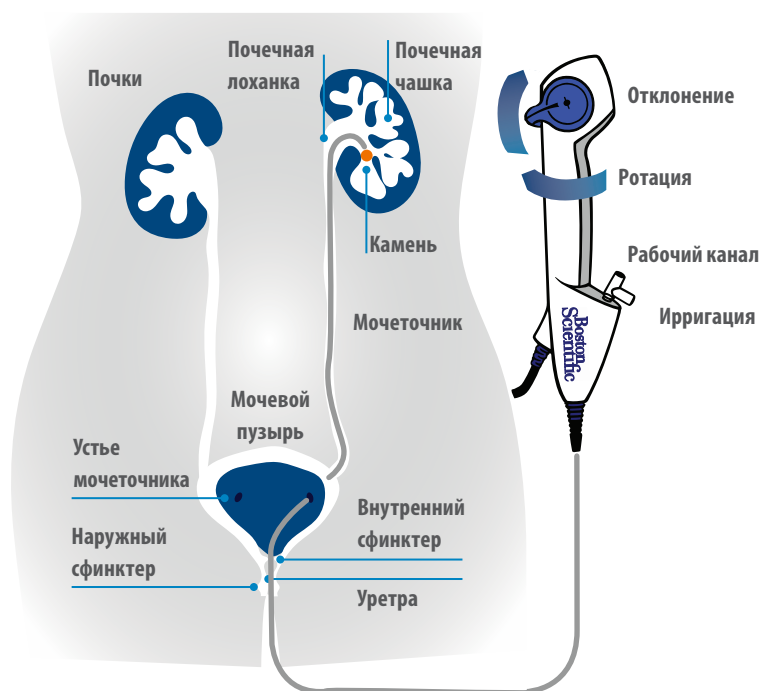

		Гибкий уретероскоп LithoVue не подключен
		Подключен гибкий уретероскоп LithoVue
		Оборудование неисправно
		Проблема с гибким уретероскопом LithoVue
		Превышено время использования

Осталось 30 минут

Все упоминаемые товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Закон разрешает продажу данных изделий только врачу или по назначению врача. Показания, противопоказания, предостережения и инструкции по эксплуатации приведены в маркировке продукции, входящей в комплект каждого изделия. Эта информация может быть использована только на территории стран, где изделие прошло надлежащую регистрацию в органах здравоохранения. Материал не предназначен для использования во Франции.

Изделия продемонстрированы сугубо в ИНФОРМАЦИОННЫХ целях и могут не быть одобрены для продажи в некоторых странах. Проконсультируйтесь с местным торговым представителем или службой поддержки клиентов по поводу наличия продукции в продаже.

Содержащаяся в настоящем документе информация предназначена для распространения только за пределами США. Иллюстрации использованы исключительно в информационных целях и не отображают фактического размера или клинического исхода.

© 2016 Руководство пользователя системной рабочей станции LithoVue.

URO-367001-AC MAR2016 Напечатано в Германии компанией Medicalvision.

Boston Scientific
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2018 Boston Scientific Corporation или ее аффилированные лица. Все права защищены. DINIURO2319RA